



DESCRITIF TECHNIQUE

Utilisateurs et situation d'emploi auquel est destiné le produit :

- Ce produit est destiné à tous ceux qui souhaitent mettre en place une barrière supplémentaire vis à vis des virus (type covid-19) se contractant par projection des gouttelettes salivaires lorsque quelqu'un tousse, parle, postillonne, éternue. Il renforce également la prévention des gestes barrières, car il évite que l'on vienne se toucher les parties sensibles du visage par inadvertance (les yeux, la bouche, le nez).
- Nous pensons que ce système de visière serait un très bon complément de protection pour le personnel soignant des hôpitaux, les infirmières libérales, les médecins, tous ceux qui sont exposés directement, mais aussi, les commerçants (supermarché, boulangerie, pharmacie, ...) qui n'ont pour le moment pas accès aux masques FFP.
- Il peut également servir aux gendarmes et policiers, qui font respecter le confinement sur les routes, aux militaires qui sont réquisitionnés pour aider aux montages d'hôpitaux de campagne (ex : Mulhouse).
- Aux particuliers qui sortent faire leurs courses.

Bref utiles et rassurants pour beaucoup de monde.

Détail technique

Matériaux utilisé pour la visière :

PETG (polyesters) :

- Transparence 88%
- Haute brillance
- Résistance aux chocs



- Résistance aux produits chimique
- Tenue au froid
- Innocuité physiologique
- Densité 1.27g/cm³
- Température d'utilisation -40 °C à +65 °C

PC (polycarbonate)

- Tenue aux chocs
- Résistance au fluage
- Excellente tenue à la température
- Densité 1.20 g/cm³
- Température d'utilisation -100 °C à + 120°C


La mousse :

- Mousse pré-comprimée
- Résistante à l'eau et à l'air
- Compression et retour à son épaisseur

Poids : 100 grammes

Epaisseur : 0.5 mm

Dimensions :

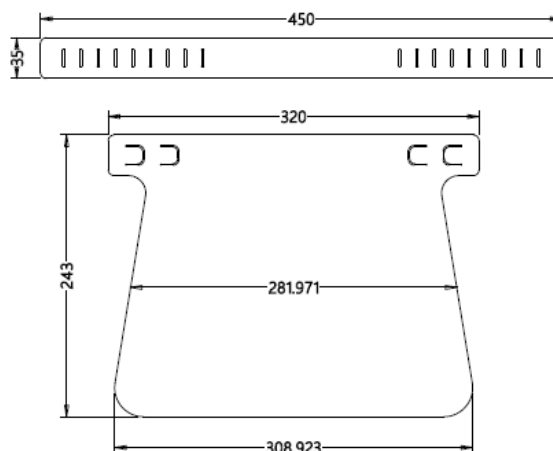




NOTICE D'UTILISATION

Visière de protection nettoyable et réutilisable

Ce masque n'est pas un jouet, ne pas laisser à la portée d'un enfant sans la surveillance d'un adulte.

COLISAGE :

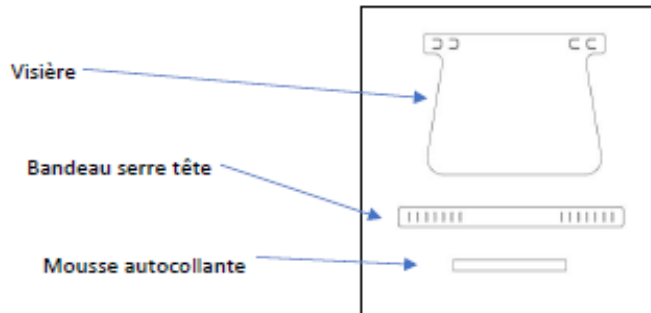




MONTAGE :

-Enlevez film de protection sur les 2 faces de la visière, et du bandeau.

-Collez la mousse autocollante sur la partie centrale à environ 20mm du bord supérieur de la visière (voir image 1).

-Mettez les 2 pattes dans les encoches prévues à cet effet tout en gardant le bandeau serre-tête vers l'extérieur de la visière (voir image 2).

-Ensuite, faire de même pour l'autre côté tout en l'adaptant à votre morphologie de tête.

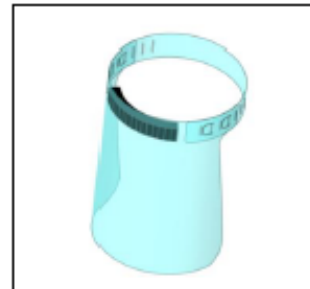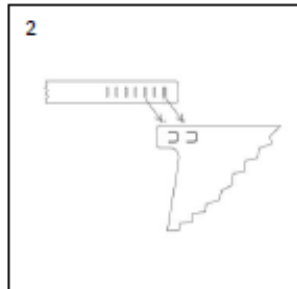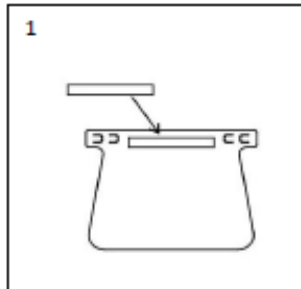

Fabriqué en France 🇫🇷

Matière : PETG ou PC recyclable

Poids : 95g environ

Utilisation :

Régalez la taille du masque à l'aide du bandeau réglable, puis, placez le masque devant votre visage.

Réajustez la taille si nécessaire

Ce produit et son fabricant ne peuvent être tenus responsables en cas de contraction d'un virus ou d'une maladie quel qu'elle soit.

Ne pas tirer dessus outre mesure, ne pas le casser, ne pas introduire quelques parties que ce soit de ce produit dans un orifice humain ou animal, ne pas l'ingérer, ne pas se le mettre dans les yeux, ne pas obstruer le tour de la visière.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de casse, d'utilisation inappropriée (pare-chocs, jets de pierres, immersion, atmosphères confinées diverses, gaz, le feu et toutes utilisations autres que la protection contre des gouttelettes salivaires, nasales ou autres sécrétions etc....)



